

แนวปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยสำหรับเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย

SARS-CoV-2

1. เตรียมหลอด EDTA ขนาด 6 mL (จุกสีม่วง) ติดฉลากชื่อ-สกุล HN ผู้ป่วย อายุ เพศ วันที่เจาะเลือด พร้อมลงลายมือชื่อผู้เจาะเลือดบนหลอดตัวอย่างเลือด
2. เจาะเลือดผู้ป่วยใส่หลอดที่เตรียมไว้ปิดฝาหลอดตัวอย่างเลือดให้สนิท
3. ผสมเลือดให้เข้ากันกับสารกันเลือดแข็งตัวโดยการพลิกหลอดกลับไปมาอย่างน้อย 8-10 ครั้ง
4. นำตัวอย่างเลือดใส่ในถุงชิป 3 ชั้น ใส่ในกระป๋องพลาสติกโดยให้ตัวอย่างเลือดตั้งตรงป้องกันการหกเลอะเทอะของตัวอย่างเลือด ปิดฝากระป๋องให้สนิท ใส่ลงในกล่องโฟมสำหรับการขนส่งตัวอย่างเลือด
5. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายนอกกล่องก่อนการนำส่ง

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โทร. 35622, 35625